



## กรองฝุ่น และเชื้อไวรัส DUST AND VIRUS FILTRATION



ฝุ่น  
DUST



ไวรัส  
VIRUS

รุ่น (Model)	แพ็คเกจ (Pack) ชิ้น (pc)	บรรจุต่อกล่อง (box) แพ็คเกจ (pack)	บรรจุต่อลัง (Carton) กล่อง (Box) ชิ้น (pc)		ราคา (Price) แพ็คเกจ (pack)
5230	1	20	12	240	35.-/Pack

ด้านหน้า (Front)

ด้านหลัง (Back)



### เหมาะสำหรับ

งานเก็บกวาดทั่วไป งานเจียร งานขัดสี งานบรรจุภัณฑ์  
เซรามิก เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Suitable for

General Sweeping, Grinding, Sanding, Drug And Flour Dust, Ceramic,  
Mine And Textile Industry, Etc.

### คุณสมบัติ

- ตัวกรองภายในดีเยี่ยม ช่วยให้ต้านทานการหายใจต่ำ
- ขอบหน้าแปลน สำหรับการปิดที่แนบสนิท
- สายรัดแบบเชื่อมติด ปราศจากส่วนผสมน้ำยางธรรมชาติ
- ปรับแถบโลหะกับสันจมูก เพื่อให้แนบสนิทมากยิ่งขึ้น
- ที่รองจมูกผลิตจาก PU โฟม ไม่ทำให้ระคายเคือง

### วิธีการใช้งาน

- วางหน้ากากอนามัยไว้ที่ปลายนิ้วมือ โดยที่แถบโลหะควรจะอยู่ด้านบน และสายรัดยางยึดจะต้องห้อยอยู่ด้านล่างของมือ
- ล้อมหน้ากากอนามัยให้คลุมใต้คางและจมูก จากนั้นให้ดึงสายรัดยางยึดครอบบนศีรษะและใต้ใบหูโดยที่สายรัดไม่บิด
- ปรับแถบโลหะด้วยนิ้วชี้และนิ้วกลางของมือทั้งสองข้างให้เข้ารูปกับสันจมูก เพื่อให้แน่ใจว่าหน้ากากอนามัยแนบสนิทเป็นอย่างดี
- การตรวจสอบพินัก

- หายใจเข้า อย่างรวดเร็ว : หน้ากากควรจะยุบเข้าหาใบหน้าของคุณเล็กน้อย
- หายใจออก : ให้ใช้มือของคุณตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศรอบๆ ใบหน้าของคุณ



### Feature

- Exceptional inside filter for lower breathing resistance
- Flange edge for secure facial seal.
- Ultrasonic welded headband for secure seal. Latex-free headband.
- Individually adjustable metallic strip nose piece for excellent fit.
- PU foam for work comfort and no irritate

### How to use

- Mask in on hand at fingertips. The metallic strip should be uppermost, allow headbands to below hand.
- Put on the mask under chin and nose piece up, locate the upper strap across the crown of the head and the lower strap below the ears. Straps must not be twisted.
- Press the metallic strip with the forefinger and middle fingers of both hands to shape of the lower part of the nose to ensure a close fit and good seal.
- Check the seal - Inhale rapidly: The mask should collapse towards your face. - Exhale : Use your hands to check for leaks a round your face.

ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค  
ขนาดใหญ่กว่า  
0.3 ไมครอน ได้มากกว่า 95%

PARTICLE FILTRATION EFFICIENCY OF  
>95% AT PARTICLE SIZE >0.3 MICRON



คำเตือน  
WARNING

- ควรตรวจสอบการสวมใส่หน้ากากอนามัย N95 ทุกครั้งให้แนบกับใบหน้าและปรับแถบโลหะให้แนบสนิทกับสันจมูกทุกครั้งก่อนการใช้งาน
- สวมหน้ากากอนามัย N95 ทุกครั้งเมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อระบบทางเดินหายใจ
- Check the mask N95 very time that it is closed to your face and adjust the steel tape to be close to your nose bridge before using.
- Wearing the mask N95 every time when you are in the risk area for breathing.