

**กรองกลิ่นไม่พึงประสงค์  
ฝุ่นควันและเชื้อไวรัส  
มีวาล์ว 2 ตัว  
ช่วยให้หายใจสะดวกขึ้น**

Filter unwanted odors, dust fumes and virus  
double valves for easy breathability



| รุ่น (Model) | แพ็คเกจ (Pack)<br>ชิ้น (pc) | บรรจุต่อกล่อง (Inner box)<br>แพ็คเกจ (pack) | บรรจุต่อลัง (Carton)<br>ชิ้น (pc) | ราคา (Price)<br>แพ็คเกจ (pack) |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 8242         | 1                           | 20                                          | 240                               | 30.-/Pack                      |

**เหมาะสำหรับ**

งานที่ต้องเจอกับปัญหาฝุ่นควันในปริมาณมาก เช่น  
ตำรวจจราจร พนักงานเก็บเงินบนทางด่วน เป็นต้น

**Suitable for**

Policeman, Traffic, Metal Fumes, Dry Chemical Handling Etc

**ประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาดใหญ่กว่า 0.3 ไมครอน ได้มากกว่า 95%**

THE FILTRATION EFFICIENCY OF THE 0.3 MICRONS THROUGH THE MASK: MORE THAN 95%

**คุณสมบัติ**

ดีไซน์รูปทรงสามเหลี่ยม พลมพองคาร์บอนช่วยป้องกันฝุ่นควันและกลิ่นเหม็นได้  
เป็นอย่างดี รูปทรงใหม่สามารถขยับปากและจมูกได้สะดวกมากขึ้น มีวาล์วสองตัว  
ช่วยในการหายใจได้สะดวก ระบายความร้อนได้มากกว่าวาล์วเดียว พับเก็บได้สะดวก  
สายรัดเป็นโฟลีโอสเตอร์สียาวยืดหยุ่นได้ดี การเย็บแบบ Triangle Design  
กระชับใส่สบาย ขอบหน้าแปลนแนบสนิทกับใบหน้าเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

**Feature**

V-shaped pleats expand to help make breathing easier mask carbon for protect  
dust and smell better more than because have the carbon, have two vale for expand  
to help make breathing easier, better cooling. Flat-fold design allows for convenient  
storage prior to use. Triangle Design fit the chin and breathing. Flange edge for  
secure facial seal.

**วิธีการใช้งาน**

- วางหน้ากากอนามัยไว้ที่ปลายนิ้วมือ โดยที่แถบโลหะควรจะอยู่ด้านบนและสายรัดที่ยึด  
จะต้องห้อยอยู่ด้านล่างของมือ
- สวมหน้ากากอนามัยให้คลุมใต้คางและจมูก จากนั้นให้ดึงสายรัดที่ยึดครอบบนศีรษะและ  
ใต้ใบหูโดยที่สายรัดไม่บิด
- ปรับแถบโลหะด้วยนิ้วชี้และนิ้วกลางของมือทั้งสองข้างให้เข้ารูปกับสันจมูก เพื่อให้แน่ใจว่า  
หน้ากากอนามัยแนบสนิทเป็นอย่างดี
- การตรวจสอบพนัก
- หายใจเข้า อย่างรวดเร็ว : หน้ากากควรจะยุบเข้าหาใบหน้าของคุณเล็กน้อย
- หายใจออก : ให้ใช้มือของคุณตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศรอบๆ ใบหน้าของคุณ

**How to use**

- Mask in on hand at fingertips. The metallic strip should be uppermost, allow headbands to below hand.
- Put on the mask under chin and nosepiece up, locate the upper strap across the crown of the head and  
the lower strap below the ears. Straps must not be twisted.
- Press the metallic strip with the forefinger and middle fingers of both hands to shape of the lower part of  
the nose to ensure a close fit and good seal.
- Check the seal - Inhale rapidly: The mask should collapse towards your face.  
- Exhale : Use your hands to check for leaks a round your face.



- ควรตรวจสอบการสวมใส่หน้ากากอนามัย N95 ทุกครั้งให้แนบกับใบหน้าและปรับแถบโลหะให้แนบสนิทกับสันจมูกทุกครั้ง  
ก่อนการใช้งาน
- สวมหน้ากากอนามัย N95 ทุกครั้งเมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อระบบทางเดินหายใจ
- Check the mask N95 very time that it is closed to your face and adjust the steel tape to be close  
to your nose bridge before using.
- Wearing the mask N95 every time when you are in the risk area for breathing.

