



CLESTA II A

 **Belmont**

2018

חיפה מדיקל בע"מ
דרך בר יהודה, 52, נשר
טלפון: 04-8218883
פקס: 04-8218884
www.belmonthm.com

חוברת הדרכה לרופא ולסייעת

תוכן

1-9	הכר את המערכת
10-11	נקיון ושמירה על המערכת
12	טיפול בתקלות נפוצות

הכר את המערכת

צד ימין

מגש רופא



- ❖ מפסק ראשי- מפעיל אוויר, מים וחשמל ביוניט.
- ❖ ברז אוויר/מים.
- ❖ קולט שמן- מרכז את שאריות השמן מהטורבינה.

חזית המגש





- A - מילוי כוס מים.
- B - שטיפת המרקקה- לחיצה ארוכה גורמת לשטיפה רציפה של המרקקה.
- C - כפתור אופציונלי (לא בשימוש).
- D - שליטה ידנית על תזוזת הכיסא.
- E - 4 מצבי כיסא אוטומטים:
- 1 LP - חזרה לתנועה אחרונה של גב הכיסא.
 - 2 0 - חזרה למצב ראשוני של הכיסא.
 - 3 1,2 - כיוון מצב אוטומטי לבחירת הרופא- לאחר כיוון ידני של הכיסא יש ללחוץ על אחד הכפתורים למספר שניות עד להישמע צפצוף וכך נקבע את המצב הרצוי.
- F - כפתור פנאומטי לתזוזת המגש.
- G - נורת ביקורת-מציינת הימצאות אוויר וחשמל ביוניט.
- H - נורת LOCK- מציינת נעילת כיסא.


חלק אופציונלי -יש להתייחס לעמוד זה ולהוראות התחזוקה שלו רק במידה וקיים ביוניט



פילטר לסקשן

מפריד נוזלים לסקשן CS1- DURR

- על מנת לטפל במפריד הנוזלים יש לפתוח את הדלת בעזרת פתיחת הכפתורים בתחתית.

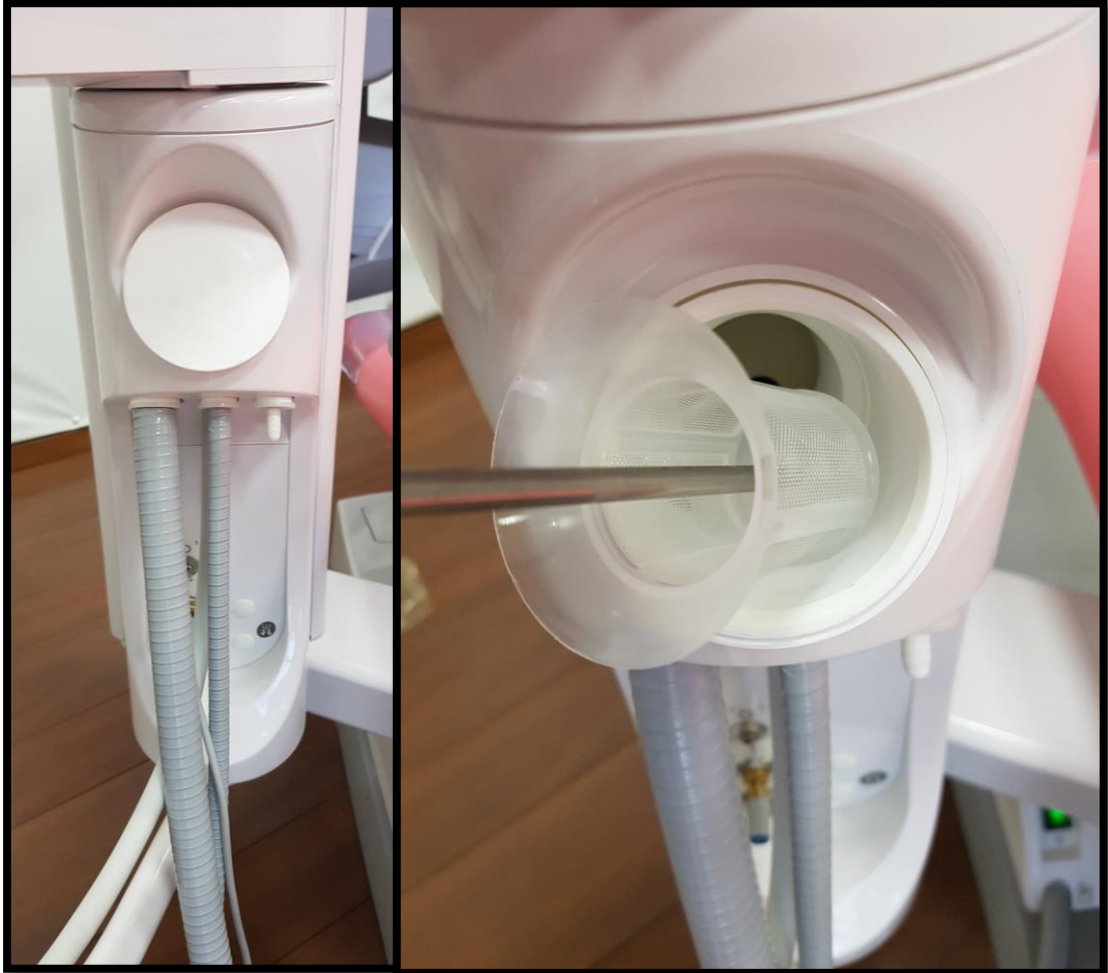

❖ פילטר סקשן - פתיחה המכסה ושליפת הפילטר.

מנורת LED TYPE 920




- ❖ מנורה בעלת 10 נורות LED היוצרות מלבן מדויק על המטופל.
- על מנת לבצע תאורה אופטימלית על המטופל יש למקם את המנורה במרחק שבין 60-70 ס"מ.
- ❖ על מנת להפעיל את המנורה יש להעביר את היד התחתית המנורה (מתחת למלבן השחור).
- בעת לחיצה על אחד מכפתורי המצבים האוטומטים של הכיסא (1/2) המנורה תדלק לאחר התנועה הסופית של הכיסא.
- בעת לחיצה על כפתור (LP/0) המנורה תכבה מיידית.

- במידה ונרצה להוריד את עוצמת האור למינימום מבלי לגעת בכפתור "ויסות תאורה" על מנת למנוע הקשיית ה"קומפוזיט" יש להחזיק את היד למשך מספר שניות מתחת לריבוע השחור (הריבוע המפעיל את התאורה) - בעת ביצוע פעולה זו נורת ה-LED הירוקה תהבהב (A).
- כפתור "ויסות תאורה" (A).



מפסק הפעלה לכיסא בלבד

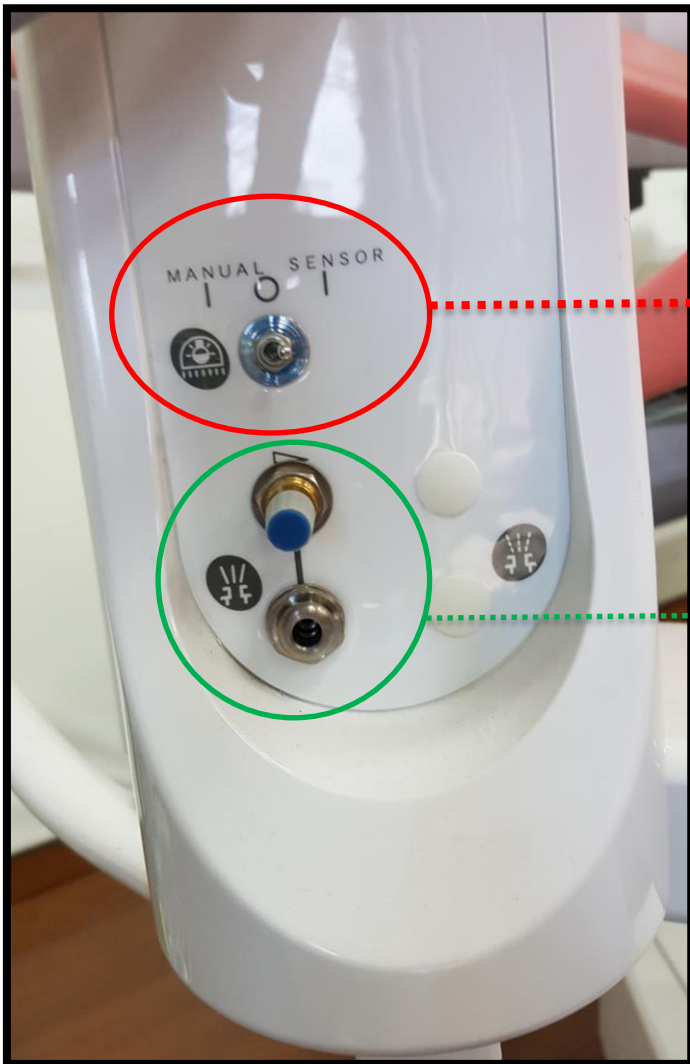

מפסק בורר למנורה

חיבור מהיר מים
לסקילר וברז
לוויסות עוצמה



- מרקה פורצלן/זכוכית נשלפת לניקוי ובעלת יכולת סיבוב של 180°

- פילטר למרקה

- כיסוי לפילטר

- ברז למילוי כוס מים

- ברז לשטיפת מרקה

- צינורות סקשן נשלפים ב- $\frac{1}{4}$ סיבוב

- לחצן לשינוי זווית וגובה משענת ראש

BELMONT

CLESTA II A

ניקיון ושמירה על המערכת

1. יש לנקות את המערכת עם מטלית רטובה ויבשה **בלבד ללא חומרי ניקוי!**
2. חל איסור מוחלט לנקות את מנורת ה-LED במטליות אלכוהול!
3. בסוף יום עבודה יש להגביה את הכיסא לגובה המקסימלי וללחוץ לחיצה רציפה על לחצן שטיפת הקערה (ראה עמוד B-3) ולהמתין לשטיפה רצופה למשך 5-10 דק'.
***יש לבצע פעולה זו גם במהלך עקירות כירוגיות!**
4. את הריפוד ניתן לנקות באמצעות מטליות אלכוהול או ספוגית הפלא.
5. ברזי מים ואוויר יש לסובב ימינה ושמאלה **לפחות** פעם בשבוע על מנת למנוע הצטברות אבנית.
6. יש לנקות את קולט השמן (ראה עמוד 1) אחת לשבועיים ע"י פתיחת הכוסית (בסיבוב קל) ולספוג את הפילטר נייר עם מטליות יבשות.
7. ניתן לשלוף את המרקקה על בסיס יומי ע"י סיבוב ומשיכה כלפי מעלה- יש להפריד את הפילטר ומכסה הפילטר (ראה עמוד 9) לפני הפירוק.
- חל איסור מוחלט להשרות בכלור!
8. יש לנקות את פילטר הסקשן (ראה עמוד 5) בסוף כל יום עבודה.
חל איסור מוחלט להשרות בכלור!
9. בסוף כל יום עבודה/במהלך ביצוע עקירה יש לשאוב כמות גדולה של מים נקיים עם שני פיות הסקשן מתוך כלי-
[REDACTED]
10. חובה בסוף יום עבודה להניח את הפדל על מושב הכיסא (כשמגבת/סמרטוט חוצצים בין הפדל לריפוד).

- .11** נדרש ניקוי יום-יומי לפילטר הצהוב של מפריד הנוזלים (ראה עמוד 4) בתוך גוף המרקקה (1CS-DURR).
- .12** יש לשמן את הגומיות (**בית פילטר, אטמים מגומי**) בוזלין.
- .13** את הצינורות של כלי היד במגש הרופא יש לנקות עם מטליות אלכוהול לפחות פעם בשבוע כדי למנוע בלאי החומר.

טיפול בתקלות נפוצות

1. כיסא לא זז- וודא מפסק דולק (ראה איור בעמוד 7).
2. סתימה במרקקה- יש להגביהה את הכיסא לגובה מקסימלי ולשפוך מים מהולים בכלור.
3. מנורה לא נדלקת- יש לוודא מפסק במצב sensor(ראה עמוד 8-אדום).

***במקרה שלא ניתן לפתור את התקלות באופן עצמאי יש לפנות אל משרדינו בטלפון: 04-8218883**

אנו תמיד עומדים לסיפותכם!